

دفترچه راهنمای استفاده اپلیکاتور سیلیکونی انتقال دارو

Dr Fertl Silicone Vaginal Applicator



معرفی محصول:

اپلیکاتور سیلیکونی Dr Fertl وسیله‌ای پزشکی برای انتقال دقیق، آسان و بهداشتی داروها به داخل واژن است. این محصول از سیلیکون پزشکی نرم و انعطاف‌پذیر ساخته شده و برای استفاده همراه با کرم‌ها، ژل‌ها، شیاف‌ها و قرص‌های واژینال طراحی شده است.

طراحی نرم و ارگونومیک محصول باعث می‌شود دارو با کمترین ناراحتی به محل مورد نظر منتقل شود.

موارد مصرف:

- این محصول برای انتقال و استفاده از موارد زیر مناسب است:
- کرم‌های واژینال
- ژل‌های واژینال
- ژل‌های کمک باروری
- داروهای هورمونی واژینال
- شیاف‌های واژینال
- قرص‌های واژینال
- مرطوب‌کننده‌های واژن
- محصولات درمان خشکی واژن

مزایای محصول:

- ساخته شده از سیلیکون پزشکی نرم
- کاهش آسیب و تحریک مخاط واژن
- استفاده آسان و راحت
- قابل شستشو و استفاده مجدد
- قابل استریل کردن در آب جوش
- سازگار با اغلب داروهای واژینال
- جایگزین اقتصادی برای اپلیکاتورهای یکبار مصرف

نحوه استفاده:

1. استفاده همراه با کرم یا ژل
2. دست‌های خود را با آب و صابون بشویید.
3. اپلیکاتور را تمیز نمایید و در آب جوش ضد عفونی کنید حدود 2 دقیقه و بعد بزارید خنک شود حدود یک الی 2 دقیقه
4. مقدار توصیه شده دارو را داخل مخزن اپلیکاتور قرار دهید.
5. در وضعیت راحت (درازکش یا نیمه نشسته) قرار بگیرید.
6. اپلیکاتور را به آرامی وارد واژن کنید.
7. پیستون را فشار دهید تا دارو تخلیه شود.
8. اپلیکاتور را خارج نمایید.
9. محصول را شستشو دهید.
10. استفاده همراه با شیاف یا قرص واژینال
11. دست‌های خود را بشویید.
12. شیاف یا قرص را در محل مخصوص قرار دهید.
13. اپلیکاتور را به آرامی وارد واژن کنید.
14. شیاف یا قرص را در محل مناسب رها نمایید.
15. اپلیکاتور را خارج کنید.

شستشو و نگهداری:

1. پس از هر بار استفاده:
2. قطعات محصول را جدا نمایید.
3. با آب گرم و شوینده ملایم بشویید.
4. کاملاً آبکشی نمایید.
5. اجازه دهید در هوای آزاد خشک شود.

روش استریل کردن:

- اپلیکاتور را به مدت 2 دقیقه در آب جوش قرار دهید.
- پس از خنک شدن استفاده نمایید.
- از تماس مستقیم با شعله یا سطوح بسیار داغ خودداری کنید.

هشدارها

- فقط برای استفاده شخصی است.
- از اشتراک محصول با دیگران خودداری کنید.
- در صورت مشاهده پارگی، تغییر شکل یا آسیب محصول را تعویض نمایید.
- در صورت بروز درد شدید، خونریزی یا واکنش غیرعادی مصرف را متوقف کرده و با پزشک مشورت نمایید.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

موارد منع مصرف:

در شرایط زیر بدون مشورت پزشک استفاده نشود:

- عفونت شدید واژینال همراه با درد شدید
- خونریزی واژینال با علت نامشخص
- جراحی اخیر واژن یا دهانه رحم
- حساسیت شناخته شده به سیلیکون پزشکی

اطلاعات ویژه برای پزشکان و متخصصان:

این اپلیکاتور از سیلیکون پزشکی با قابلیت انعطاف بالا ساخته شده و برای انتقال داروهای واژینال طراحی شده است. طراحی نرم سر اپلیکاتور احتمال آسیب به اپیتلیوم واژن و دهانه رحم را در مقایسه با بسیاری از اپلیکاتورهای پلاستیکی سخت کاهش می‌دهد.

کاربردهای بالقوه:

- درمان عفونت‌های واژینال
- تجویز پروژسترون واژینال
- درمان آتروفی واژن
- استفاده در درمان‌های کمکباروری
- انتقال ژل‌های باروری
- استفاده پس از برخی اقدامات درمانی زنان

پرسش‌های متداول:

- آیا محصول یکبار مصرف است؟
- خیر. در صورت شستشوی صحیح، قابل استفاده مجدد حداقل تا 500 بار است.
- آیا می‌توان آن را جوشاند؟
- بله. اپلیکاتور قابلیت استریل شدن در آب جوش را دارد.
- آیا در دوران بارداری قابل استفاده است؟
- فقط طبق نظر پزشک یا ماما.
- آیا برای استفاده از شیاف مناسب است؟
- بله. برای انتقال شیاف و قرص‌های واژینال نیز طراحی شده است.

اطلاعات تولیدکننده:

Dr Fertl برند

به سفارش شرکت بهره هوشمند سلامت

وبسایت:

www.atsama.ir / www.drferlil.com

ساخت ایران

نسخه: 1.0

(Medical Device) ، مطابق الزامات ISO 13485